

Til deg som har fått Rekovelle® foreskrevet av en lege

Denne pasientveiledningen inneholder informasjon om Rekovelle ferdigfylt penn. Følg trinnene i denne veiledningen for å klargjøre og bruke pennen korrekt.

Kontakt lege eller sykepleier hvis du har spørsmål om bruken av Rekovelle.

Før den første injeksjonen vil helsepersonell forklare hvordan du bruker Rekovelle ferdigfylt penn.

Les nøye gjennom pakningsvedlegget og brukerveiledningen som følger med i pakningen, før du begynner å bruke Rekovelle ferdigfylt penn første gang og også hver gang du tar i bruk en ny penn.


Viktig informasjon om oppbevaring/bruk

- Oppbevar alltid pennen med pennehetten på og uten påsatt kanyle.
- Ikke bruk pennen etter utløpsdatoen (EXP) som er trykt på pennens etikett. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
- Ikke oppbevar pennen ved ekstreme temperaturer (f.eks. i direkte sollys, i en parkert bil eller i en fryser).
- Oppbevar pennen utilgjengelig for barn og personer som ikke har fått opplæring i bruk av pennen.
- Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
- **Før pennen tas i bruk skal den oppbevares i kjøleskap ved 2 °C til 8 °C og skal ikke fryses.**
- Oppbevar pennen i kjøleskap ved 2 °C til 8 °C. Skal ikke fryses.
- Dersom pennen oppbevares utenfor kjøleskap (ved eller under 25 °C), er den holdbar inntil tre måneder inkludert tiden pennen er i bruk. Kast pennen dersom den ikke er brukt opp innen tre måneder.
- **Etter at pennen er tatt i bruk, må den brukes innen 28 dager. I bruksperioden kan pennen oppbevares ved eller under 25 °C og skal ikke fryses.**


På felleskatalogen.no kan du se en instruksjonsfilm for bruk av **Rekovelle ferdigfylt penn**.



PASIENTVEILEDNING

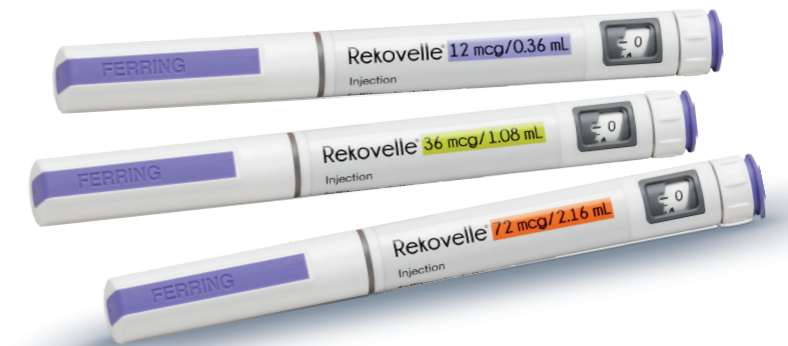

Rekovellet[®] ferdigfylt penn

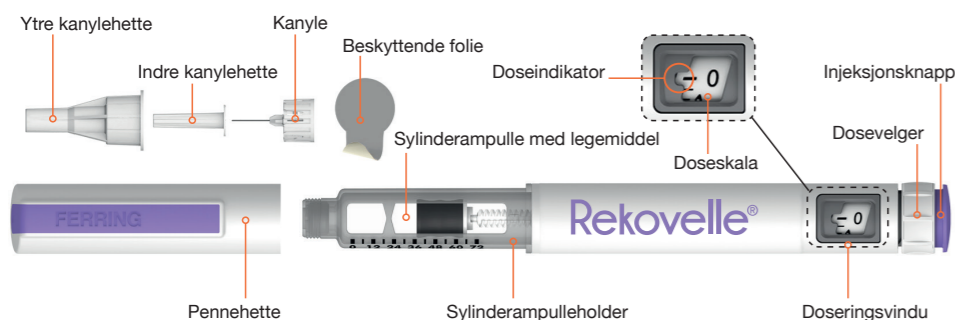

Rekovellet ferdigfylt penn er en bruk-og-kast penn som kan brukes til å gi mer enn én forhåndsinnstilt dose av Rekovelle.

Pennen er tilgjengelig i tre forskjellige volumer:

- 12 mikrogram/0,36 ml
- 36 mikrogram/1,08 ml
- 72 mikrogram/2,16 ml

Pennen kan innstilles til å gi doser mellom 0,33 mikrogram og 20 mikrogram Rekovelle i markerte trinn à 0,33 mikrogram.

Rekovellet-pennen skal kun brukes til behandlingen den er foreskrevet til, og slik som vist av helsespersonell.

Til høyre kan du følge trinnvise instruksjoner for hvordan du bruker Rekovellet ferdigfylt penn.

For fullstendig informasjon, vennligst les pakningsvedlegget og brukerveiledningen som følger med i hver pakke.

Pakningsvedlegget og brukerveiledningen kan du også finne på www.felleskatalogen.no.

Trinnvis veiledning i bruk av Rekovellet[®] ferdigfylt penn

Før du bruker Rekovellet-pennen bør du vaske hendene med såpe og vann.

1) Påfesting av kanyle



Ta av pennehetten og fjern beskyttelsesfoilen på kanylen. Kanylen skal klikkes på pennen. Bruk alltid en ny kanyle for hver injeksjon.

3) Klargjøring



Skrudosevelgeren med klokken inntil et dråpesymbol kommer på linje med doseindikatoren. Hold pennen med kanylen pekende opp. Knips på syylinderampulleholderen slik at eventuelle luftbobler i syylinderampullen stiger opp til toppen.

2)



Ta av den ytre kanylehetten. Ikke kast den ettersom du trenger den senere. Fjern og kast den indre kanylehetten.

4)



Mens kanylen fortsatt peker opp, trykk injeksjonsknappen helt inn inntil tallet '0' er på linje med doseindikatoren. Sjekk at det kommer ut en væskedråpe av tuppen av kanylen. Dersom det ikke kommer noen væskedråpe(r), må steg 3-4 gjentas inntil det kommer en dråpe. **Pennen er nå klar til bruk.**

5) Innstilling av dosen



Skrudosevelgeren med klokken til foreskrevet dose kommer på linje med doseindikatoren i doseringsvinduet. Dosen kan korrigeres både opp og ned ved å skrudosevelgeren i den ene eller andre retningen uten at legemiddel går tapt.

7) Injisering av dosen



Rekovellet skal gis som en injeksjon rett under huden (subkutant) i mageområdet (abdomen). Velg et nytt injeksjonssted for hver injeksjon for å redusere risikoen for hudreaksjoner som rødhet og irritasjon. Vask huden på injeksjonsstedet med en spritserviett.

Klyp tak i huden og sett kanylen rett inn i huden slik vist av helsepersonell. Trykk injeksjonsknappen helt inn og **hold den inne i 5 sekunder** til du ser at tallet '0' er på linje med doseindikatoren. Dette sikrer at du får hele dosen. Slipp injeksjonsknappen og fjern kanylen sakte fra injeksjonsstedet ved å trekke den rett ut av huden.

6) Delt dose

Dersom du ikke får stilt inn full foreskrevet dose på pennen, betyr det at det ikke er nok legemiddel igjen i pennen til å få satt hele dosen.

Du må da sette deler av foreskrevet dose med pennen du har i bruk, og resten av dosen med en ny penn.

Se brukerveiledningen for detaljert informasjon.

8) Fjerning av kanylen



Sett ytre kanylehette forsiktig på kanylen igjen ved å gi den et trykk. Skrudøsevelgeren fra pennen ved å vri mot klokken. Kast den brukte kanylen.

Fjern alltid kanylen etter bruk. Kanylen er kun til engangsbruk.

Sett hetten på pennen for å beskytte den mellom hver bruk.